

## Magneetillisiin ylipainehoitomaskeihin käyttörajoituksia

ResMed-yhtiön magneetillisten ylipainehoitomaskien käyttösuositukseen on tullut muutoksia. Magneetillisiä CPAP/APAP/NIV-ylipainehoitomaskeja käytetään uniapnean ja pitkäaikaisen hengitysvajeen hoidossa.

Magneetillisiä osia sisältäviä maskeja ei pidä käyttää, jos potilaalla itsellään tai potilaan käyttäessä maskia jollain häneen fyysisessä lähikontaktissa olevalla henkilöllä on jokin seuraavista:

- **Aktiivinen lääkinällinen implantti, joka reagoi magneetteihin** (esim. sydämentahdistin, implantoitava kardioverteri-defibrillaattori (ICD), neurostimulaattori, aivo-selkäydinnestesuntti (CSF) tai insuliini-/infuusiopumppu)
- **Metallinen implantti/koje, joka sisältää ferromagneettista materiaalia** (aneurysman korjaamiseen tarkoitettu klipsi/vuodon estävä kierukka, embolinen sulkija, stentti, venttiili, elektrodi, kuuloa tai tasapainoa parantava implantoidun magneetin sisältävä sisäkorvaistute, silmäimplantti tai silmiin tunkeutunut metallisiru)

Magneetillisiä osia sisältävän maskin tulee olla vähintään 15 cm päässä näistä metalleja sisältävistä tuotteista.

### **Rajoitus koskee seuraavia maskityyppejä:**

**Kokkasvomaski:** AirFit F20, AirFit F20 for Her AirTouch F20, AirTouch F20 for Her AirFit F30 AirFit F30i

**Nenämaskit:** AirFit N10, AirFit N10 for Her AirFit N20, AirFit N20 for Her AirTouch N20, AirTouch N20 for Her

**Ilma-aukoton maski:** AirFit F20 NV

Jos et edellä mainituista syistä enää voi käyttää omaa magneetillistä maskiasi, olethan yhteydessä omaan hoitavaan yksikkösi (Maise tai takaisinsoitto) ja sovit maskin vaihtamisesta uuteen.