

Käytettyjen instrumenttien lajittelu kuljetuslaatikkoon yksikössä

Käsittele käytettyjä instrumentteja aina suojakäsineiden kanssa.

Käytä kannellista säilytys/kuljetuslaatikkoa.

1. Avaa ja lajittele instrumentit laatikkoon, kuten sakset, peanit, crilet ym.
2. Sumuta kevyesti **esikäsittelyainetta/geeliä** laatikossa olevien instrumenttien päälle. Esikäsittelyaine/geeli estää orgaanisen lian kiinnittymisen ja kuivumisen sekä mikrobien lisääntymisen käytetyissä instrumenteissa. Geelimäinen suihke leviää helposti instrumenttien pinnalle. Sulje laatikon kansi.

Aina lisätessä instrumentteja laatikkoon, suihkuta **kevyesti** esikäsittelyainetta/geeliä instrumenttien päälle ja laita kansi kiinni.

Aremmat tuotteet voi laittaa muovipussiin ennen laatikkoon laittamista.

Pidä kuljetuslaatikon ulkopuoli ja kansi puhtaana.