

Pintadesinfektioaineet

Pintadesinfektioaineet lääkinnällisten laitteiden ja välineiden sekä infektioiden torjunnan kannalta kriittisten pintojen desinfiointiin. **Muista merkitä tuotteen käyttöönottopäivämäärä ja/tai valmistajan antama voimassaoloaika avaamisesta. Vaikutusaika on pinnan pyhittämisen ja kuivumiseen kulunut aika, jos ei muuta mainita. Käytä suojakäsineitä ihonsuojauksiksi.** Noudata lisäksi valmistajan puhdistus- ja desinfiointiohjeita. **Tarvittaessa yhteys hygieniahoitajaan, mikäli epäselvyyttä aineen tehoavaisuudesta.** Tutustu myös Eritetahradesinfektio-ohjeeseen Kaksivaiheinen eritetahradesinfektio

Keskusvarastotuote Valmistenimi ja vaikuttava aine	Pitoisuus ja säilyvyysajat Merkitse viimeinen käyttöpäivä pulloon (kts. tiivisteen voimassaoloaika)	Käyttötarkoitus ja teho
Oxivir Plus Spray (peroxygeeni) 750 ml	3,5 % vaahto , valmis käyttöliuos. Säilyvyys 2 vuotta.	Pesevä desinfektioaine, eritetahradesinfektio ja pintadesinfektio. Tehoaa Acinetobacter bauman, noro, tbc. adeno
Oxivir Plus (peroxygeeni) 1 l ja 5 l	3,5 % laimennettu käyttöliuos, 35 ml + 965 ml viileää vettä Säilyvyys 1 vuosi. 15 % laimennettu käyttöliuos, 150 ml + 850 ml viileää vettä Säilyvyys 1 vuosi.	Kuten yllä. Kuten yllä. Tehoaa Cl. difficile, Candida auris, kts. erillinen potilaan huoneen siivous Ohje (hus.fi)
Erisan Oxy+ (vetyperoksidi ja peretikkahappo) Käytetty liuos vaihdettava päivittäin. Vaikutusajat riippuvat käyttöliuoksien vahvuudesta.	2 % laimennettu puhdas käyttöliuos, 1 annospss + 2,5 l lämmintä vettä. Säilyvyys 1 viikko. 5 % laimennettu puhdas käyttöliuos, 1 annospss. + 1 l lämmintä vettä. Säilyvyys 2 vrk.	Pesevä desinfektioaine, välineiden liotus, eritetahradesinfektio ja pintadesinfektio. Tehoaa noro, Cl. difficile, tbc, Candida albicans. Kuten yllä.

Tevan Panox 200 (vetyperoksidi ja peretikkahappo) 750 ml spray ja 5 l	Valmis käyttöliuos. Säilyvyys 2 vuotta. Ei lääkinnällisille laitteille	Eritetahradesinfektio ja pintadesinfektio. Tehoaa noro, adeno, Cl. difficile
Klorilli (kloramin-T) 1 l ja 5 l	1000 ppm 50 ml + 950 ml viileää vettä. Puhdas käyttöalaimennosliuos. Säilyvyys 4 viikkoa.	Pesevä erikoisdesinfektio- ja pintadesinfektioaine. Tehoaa Acinetobacter bauman, noro, Cl. difficile, tbc.
Easydes (etanoli) 500 ml, 700 ml spray ja 5 l	Säilyvyys 3 v valmistusajankohdasta.	Pesevä desinfektioaine alkoholia kestäville pinnoille, ei välineliotukseen. Ei tehoa Cl. difficile

Pintadesinfektioliin- nat	Merkitse käyttöönottopäivä pakkaukseen	Käyttötarkoitus
Oxivir Excel Wipe (peroxygeeni) 20x27 cm	Avattu pakkaus säilyy 28 vrk. 30 pyyhettä/paketti. 	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfektio- tioppyhe, vettä kestäville pinnoille, alko- holiton. Tehoaa adeno ja noro Ei tehoa Cl. difficile
WipeClean Alco Free Disinfection (triamine) 20x30 cm	Avattu pakkaus säilyy 2 kk. 25 pyyhettä/paketti. 	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfek- tioppyhe, vettä kestäville pinnoille, alko- holiton. Kostea ja vaahtoava liina. Isoille pinnoille. Tehoaa noro, Cl.difficile.
WetWipe Triamin Disinfection (triamin) 20x30 cm	Avattu pakkaus säilyy 30 vrk. 25 pyyhettä/paketti. 	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfek- tioppyhe, vettä kestäville pinnoille, alko- holiton. Ei tehoa Cl.difficile, noro, adeno ja rota.

ApoWIPE Spor- icidal Disinfection 30x22 cm	Avattu pakkaus säilyy 30 vrk. 32 pyyhettä/paketti. 	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfektiopyyhe, vettä kestäville pinnoille, alkoholiton. Tehoaa Cl.difficile, noro, adeno ja rota
ApoWIPE Ethanol Disinfection Mini 15x14 cm	Avattu pakkaus säilyy 7 vrk. 10 pyyhettä/paketti.  Yksittäispakattu steriili pyyhe.	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfektiopyyhe, alkoholia kestäville pienille pinnoille. Ei tehoa Cl. difficile
ApoWIPE Ethanol 80 % (alkoholi) 12x18 cm	Avattuna säilyy 10 vrk. 800 pyyhettä/laatikko. 	Alkoholipyyhe kanyylikorkkien, injektioporttien sekä liittimien desinfiointiin. Vaikutusaika 30 sek.
Sanitizer S1 (vetyperoksidipohjainen) 20 x 20 cm	Avattuna säilyy 2 kk, 100 pyyhettä/paketti. 	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfektiopyyhe, vettä kestäville pinnoille, alkoholiton. Tehoaa Cl. difficile, noro ja korona
Apteekkituote	Säilyvyys	Käyttötarkoitus
Desioil 5 l ja 500 ml (etanoli)	Etanoli 75 p-%. Säilyvyys 5 vuotta, avattuna 2 vuotta.	Pesevä desinfektioaine alkoholia kestäville pinnoille, ei välineliotukseen. Ei tehoa Cl.difficile
Desinfektol P (etanoli) 100 ml ja 500 ml	Etanoli 70 p-%. Säilyvyys 5 vuotta, avattuna 2 vuotta.	Etanolipohjainen pintadesinfektioaine kuiville pinnoille, ei välineliotukseen. Ei tehoa Cl.difficile
OL Antistaatti 100 ml suihkepullo	Isopropyylialkoholi 40 p-%. Säilyvyys 2 vuotta, avattuna 1 vuosi.	Etanolipohjainen liuos näppäimistön ja hiiren desinfioivaan puhdistukseen.